

## Gebrauchsanweisung für Daddy's Choice™ T0001 FFP2 Halbfiltermaske

### Spezifikationen

#### Allgemein

**Handelsmarke**

Daddy's Choice™ T0001  
Filtering Half Mask

**Hersteller**

DADDYS CHOICE  
Shandong Daddy's Choice Health Science and Technology Co., Ltd.

#### Material

**Außenseite**

Vliesstoff aus Polypropylen

**Innenseite**

Vliesstoff aus PP

**Filtermedium**

PP Mikrofaser (melt blown)

**Nasenbügel**

Eisendraht mit Polyethylen ummantelt, detektierbar

**Gummiband**

Latexfreier Synthesekautschuk

#### Anforderungen und Normen

**Persönliche Schutzausrüstung**

PS, Kategorie III



**Klassifizierung**

**Atemschutzgeräte – Filtrierende Halbmasken zum Schutz gegen Partikeln**

EN 149:2001 + A1:2009 FFP2

#### Gebrauchsanweisung

1. Halten Sie die Maske mit dem Nasenstück oben und ziehen sie auf (siehe Bild 1)
2. Kinn und Gesicht in die Maske legen und die Ohrschlingen anlegen (siehe Bild 2).
3. Den Nasenbügel so einstellen, dass er zur Nasenkontur passt (siehe Bild 3).
4. Stellen Sie den Nasenbügel und die Ohrschlingen neu ein, wenn die Ausatemluft aus dem Nasenstück austritt.
5. Zur Sicherung die Ohrschlingen mit dem Clip am Hinterkopf zusammenbringen.

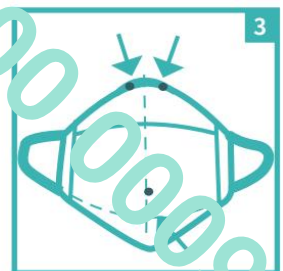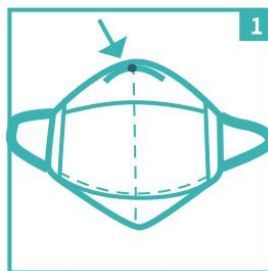

#### Benutzeranweisungen

- Die Masken sind für normale Gesichtsgrößen erhältlich. Je nach Gesichtsgröße muss die passende Maske ausgewählt werden (bitte achten Sie darauf).
- Der Benutzer der Maske muss zur funktionsgerechten Handhabung via Gebrauchsanweisung genau beachten.
- FFP Masken schützen nicht gegen Gase und Dämpfe.
- Der Sauerstoffgehalt in der Atemluft muss mindestens 19,5 Vol.% betragen.
- Der Atemschutz darf nicht eingesetzt werden, wenn Konzentration, Art und Eigenschaft der Schadstoffe nicht bekannt sind.

- Die Maske ist sofort zu wechseln, wenn sie beschädigt ist oder der Atemwiderstand ansteigt. Nach dem Ende einer Arbeitsschicht ist die Maske grundsätzlich zu wechseln.
- Niemals Veränderungen an der Maske vornehmen.

### Weitere Produktinformationen

#### Gebrauch

Einmalgebrauch

#### Lagerung

Ohne direkte Sonneneinstrahlung, in Originalverpackung trocken lagern, siehe auch Verpackung.  
Unter Einhaltung der Lagerbedingungen hat das Produkt eine Lagerdauer von 3 Jahren.

#### Umweltverträglichkeit und Entsorgung

Das Produkt kann thermisch verwertet oder auf Deponien entsorgt werden ohne giftige Stoffe freizusetzen. Bei kontaminierten Produkten sind die geltenden Gesetze und nationalen Vorgaben zu beachten.

#### Atemwiderstand

Der vom Filter der Atemschutzmaske erzeugte Atemwiderstand wird bei einem Luftstrom von 30l/min und 95l/min gemessen.

Klasse Max. Atemwiderstand gemäß EN 149

	30 l / min	95 l / min
FFP2	0,7 mbar	2,4 mbar
FFP3	1,0 mbar	3,0 mbar

**WICHTIG :** Bei der EN 149:2001+A1:2009 unterscheidet man 3 Kategorien von filtrierenden Halbmasken gegen feste und flüssige Aerosole: FFP1, FFP2 und FFP3. Bitte Sie diese Information weiterlesen, prüfen Sie bitte, zu welcher Kategorie Ihre Maske gehört. Sie finden diese Information sowohl auf der Maske als auch auf der Verpackung.

### ANWENDUNGEN :

- FFP1 : Filtrierende Halbmasken der Kategorie FFP1 schützen gegen feste und flüssige Partikel von allen Feinstäuben bis zu einem 4 fachen des jeweils gültigen MAK- bzw. TRK-Wertes.
- FFP2 : Filtrierende Halbmasken der Kategorie FFP2 schützen gegen feste und flüssige Partikel von allen Feinstäuben bis zu einem 10 fachen des jeweils gültigen MAK- bzw. TRK-Wertes.
- FFP3 : Filtrierende Halbmasken der Kategorie FFP3 schützen gegen feste und flüssige Partikel von allen Feinstäuben bis zu einem 30 fachen des jeweils gültigen MAK- bzw. TRK-Wertes.

**PRÜFUNG VOR DEM GEBRAUCH :** Vergewissern Sie sich vor dem Gebrauch, dass die filtrierende Halbmaske einschließlich aller Bestandteile keine Löcher, Risse oder sonstige Schäden aufweist. Falls Sie einen Schaden entdeckt, NUTZEN SIE DIE MASKE AUF KEINEN FALL. Benutzen Sie eine neue.

**\*ANMERKUNG:** Maske sofort austauschen, wenn das Atmen schwieriger wird oder die Maske beschädigt oder so verformt ist, daß eine optimale Abdichtung nicht mehr gewährleistet ist. Maske nur gemäß dieser Anleitung benutzen.

### WARNHINWEISE:

1. Mißachtung der hier gegebenen Anweisungen oder Anwendungsbeschränkungen für dieses Produkt können die Wirksamkeit dieser Maske reduzieren und Übelkeit oder gar Tod zur Folge haben.
2. Eine sorgfältig ausgesuchte Maske ist essentiell zum Schutz Ihrer Gesundheit. Vor der Anwendung dieses Maske konsultieren Sie eine entsprechende Sicherheitsorganisation, um festzustellen, ob diese Maske den Anforderungen des geplanten Einsatzbereiches entspricht.
3. Filtrierende Halbmasken sind von der Umgebungsatmosphäre abhängig. Nur in ausreichend belüfteten Umgebungen verwenden. Nicht verwenden, wenn die Atmosphäre weniger als 19,5% Sauerstoff enthält.

4. Atemschutzmasken dürfen nicht eingesetzt werden, wenn die Konzentration der Schadstoffe eine unmittelbare Bedrohung für die Gesundheit oder das Leben darstellen.
5. Benützen nicht in einer explosiven Atmosphäre.
6. Der Arbeitsraum ist sofort zu verlassen, wenn (a) das Atem schwierig wird, (b) Schwindel oder Erschöpfung auftritt.
7. Gesichtshaare sowie spezielle Charakteristika der Gesichtsform können u. U. die Wirksamkeit dieser Maske reduzieren.
8. An der Maske dürfen keine Veränderungen oder Modifikationen vorgenommen werden.
9. Zum einmaligen Gebrauch bestimmt. Keine Pflege notwendig. Nach Gebrauch fachgerecht entsorgen.
10. Masken in der Verpackung vor direkter Sonneneinwirkung entfernt bis zum Gebrauch aufbewahren.

**Benannte Stelle für EU-Baumusterprüfbescheinigung nach EN149:2001+A1:2009:**

Notified body for EU Type Examination certificate:

**UNIVERSAL CERT/ TR (NB2163):**

Yukariya Dudullu Şirmaniye / Istanbul / Turkey

**Module B: Certificate** No. 2163-PPE-1056; **Test report** for FFP2 NR Mask: 2163-KKD-1056

**Module C2: Certificate** No. 2163-PPE-1056/01; **Test report** for FFP2 NR Mask: 2163-PPE-1056/01



**Benannte Stelle für QM/ Product Service und Verifikation nach EU Directive 2016/425 und 89/686/EEC**

Notified body for EU Type Verification and Quality Management certificate according EU Directive 2016/425

Module C2 and 89/686/EEC:

**BSI (2797)** BSI Group The Netherlands B.V. / Amsterdam / Holland

**Certificate** No. CE 729899 (CE BSI EU type examination certificate)

**Certificate** No. CE 729900 (CE BSI Module C2 certificate)

**Benannte Stelle für Produkt Verifikation nach EU Directive 2016/425 und 89/686/EEC**

Notified body for EU Type product verification according EU Directive 2016/425 Module C2 and 89/686/EEC:

**TÜV Rheinland (Notified Body number: 0191)** Test Report verification of T0001 via TÜV Rheinland, located in Shandong, PR. China / TÜV Rheinland AG, Am Grahen Stein, 51105 Köln, Germany / Certification No.: 244274876a 001

**Konformitätserklärung CE :**

Die Konformitätserklärung können sie unter [www.daddys-choice.de](http://www.daddys-choice.de) downloaden.

YIWU-Hamburg

Datenblatt T001  
Datenblatt T001



GmbH - Tel: 0800 0009 888